

Bedienungsanleitung c.a.t. Kinderrückhaltesystem für Rettungsfahrzeuge

CE DE/CA39/1131 Deutsches Patent DE 44 09 510 C 2 DGBM G93 13 189.5

c.a.t. – das Kinderrückhaltesystem für Kleinkinder und Schulkinder von ca. 6 ten Lebensmonat (**c.a.t – mini**) bis ca. 10 tes Lebensjahr (**c.a.t – maxi**). Geeignet für alle Krankentragen zum Liegendtransport eines Kleinkindes und Kindes in entgegengesetzter Fahrtrichtung, zur Benutzung in einem Rettungsfahrzeug.

c.a.t.- das Kinderrückhaltesystem vor dem Gebrauch aus dem Aufbewahrungssack entnehmen.

Bei internistischen Notfällen und Hausunfällen mit Kindern empfiehlt es sich, **c.a.t.- das Kinderrückhaltesystem** mit in den Wohnbereich zu nehmen und das zu transportierende Kind schon vor Ort hineinzulegen.

Dadurch wird vermieden, dass ein Kind z.B. äußeren Witterungseinflüssen beim Einladen in das Rettungsfahrzeug ausgesetzt ist.

Die Eigenwärme des Kindes wird durch **c.a.t.** erhalten !

Vor dem Hineinlegen des Kindes in das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** ist der mittlere Reißverschluss auf der Vorderseite vollständig zu öffnen.

Außerdem sind die Schnellverschlüsse am Schulterbereich zu öffnen.

Nachdem das Kind in das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** hineingelegt wurde, wird der vordere Reißverschluss wieder verschlossen.

Anschließend werden der rechte und linke Schnellverschluss am oberen Brustbereich durch Ineinanderklicken fest verbunden.

Die Gurtbänder können nun über das Schnellverschlussystem so angezogen werden, dass das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** sich der Körpergröße des Kindes anpasst.

Befestigung des c.a.t.-Kinderrückhaltesystems auf einer Krankentrage

Ferno, Stryker und Stollenwerk – Krankentragen (Artikelnummer 5301):

Bei Ferno – und Stryker Tragen befestigen Sie die seitlich angebrachten Gurtbänder mit dem Seitenholm der jeweiligen Trage, in dem Sie die seitlich dafür vorgesehenen Gurtbänder mit den jeweils am Ende befindlichen Schnellverschlussystem um den Seitenholm verbinden. Durch Anzurren der seitlichen Gurtbänder wird das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** mit der Krankentrage fest verbunden.

Das Gurtband am unteren Ende des **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** wird mit dem unteren Haltebügel der jeweiligen Krankentrage durch Umlegen der Haltegurte um den Haltebügel und Zusammenklicken der Schnellverschlüsse verbunden. Durch Festzurren des Gurtbandes erhält das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** neben der seitlichen Befestigung auch die Sicherheit, dass bei starkem Abbremsen des Rettungsfahrzeuges das Rückhaltesystem fest auf der Krankentrage verbunden bleibt.

c.a.t. – das Kinderrückhaltesystem bietet als eines der wenigen Kinderrückhaltesysteme in Rettungsfahrzeugen die Gewähr, dass der kleine Patient optimal auf Kräfteeinwirkung von vorne, von hinten und jeweils seitlich optimal geschützt ist !

Für alle anderen Krankentragen c.a.t. – universal (Artikelnummer 5302):

Für Krankentragen, bei denen es nicht möglich ist, das **c.a.t. – Kinderrückhaltesystem** seitlich an den Holmen einer Krankentrage zu befestigen, verwenden Sie bitte **c.a.t. – universal**, passend für alle Krankentragen.

Vor dem Hineinlegen des Kindes in das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem –universal** ist der mittlere Reißverschluss auf der Vorderseite vollständig zu öffnen.

Außerdem sind die Schnellverschlüsse am Schulterbereich zu öffnen.

Nachdem das Kind in das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** hineingelegt wurde, wird der vordere Reißverschluss wieder verschlossen.

Anschließend werden der rechte und linke Schnellverschluss am oberen Brustbereich durch Ineinanderklicken fest verbunden.

Die Gurtbänder können nun über das Schnellverschlusssystem so angezogen werden, dass das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** sich der Körpergröße des Kindes anpasst.

Befestigen Sie das **c.a.t. – Kinderrückhaltesystem universal** mit den quer angebrachten Gurten, fest in Querrichtung um Ihre Krankentrage herum. Verbinden Sie nun die Schnell – verschlüsse unterhalb, in der Mitte der Trage. Durch Festzurren der seitlichen Spanngurte erhält das **c.a.t. – Kinderrückhaltesystem** den stabilen Schutz auf der Krankentrage.

Das Gurtband am unteren Ende des **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** wird mit dem unteren Haltebügel der jeweiligen Krankentrage durch Umlegen der Haltegurte um den Haltebügel und Zusammenklicken der Schnellverschlüsse verbunden. Durch Festzurren des Gurtbandes erhält das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** neben der seitlichen Befestigung auch die Sicherheit, dass bei starkem Abbremsen des Rettungsfahrzeuges das Rückhaltesystem fest auf der Krankentrage verbunden bleibt.

Pflegehinweise

Das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem** ist bis 95 Grad waschbar.

c.a.t. – das Kinderrückhaltesystem ist antiallergisch, dadurch für jedes Kind geeignet !

Garantie

Sie erhalten auf das **c.a.t.-Kinderrückhaltesystem zwei Jahre Garantie**. Für Abnutzungserscheinungen, die bedingt durch Mechanismen entstanden sind, die das Material zerstören (z.B. Schleifen auf Asphalt, Einwirkung von Batteriesäure oder andere ähnlich ätzende Substanzen, **Mangeln**) übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz das c.a.t.-Kinderrückhaltesystem auf die volle Funktionsfähigkeit.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Wegen einer möglichen Aspirationsgefahr darf ein Kind nie unbeaufsichtigt in einem c.a.t.-Kinderrückhaltesystem fixiert sein!

c.a.t. – medical GbR
 Geschäftsführer: Hans-Jürgen Meier Wolfgang Hilspach
 Anschrift: 79110 Freiburg, Schongauerweg 47
 Tel. 0761/89759487 Fax. 0761/894822
 e-mail whilspach@cat-medical.de
 www. cat-medical.com

c.a.t. – medical GbR
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Meier Wolfgang Hilspach
Anschrift: 79110 Freiburg, Schongauerweg 47
Tel. 0761/89759487 Fax. 0761/894822
e-mail whilspach@cat-medical.de
[www. cat-medical.com](http://www.cat-medical.com)